

---

# **SYSTEM STROBEL** – Auffahrrampe

QUALITÄT DIE LEBEN RETTET

Benutzerhandbuch

Für die künftige Verwendung aufbewahren!




---

## Inhalt

1.	Allgemeines .....	3
2.	Sicherheit.....	3
3.	Übersicht .....	4
3.1.	Verwendung und Leistungsbeschreibung .....	4
3.2.	Technische Daten .....	4
4.	Bedienelemente der Auffahrrampe .....	4
4.1.	Bezeichnungen .....	4
4.2.	Gesamtübersicht .....	4
5.	Bedienung.....	5
5.1.	Auffahrrampe ausklappen.....	5
5.2.	Trage- oder Rollstuhl be- und entladen .....	6
5.3.	Auffahrrampe einklappen .....	6
6.	Pflege und Wartung.....	7
7.	Service .....	7

## 1. Allgemeines

In diesem Benutzerhandbuch werden folgende Symbole und Signalwörter verwendet:

	<p><b>Vorsicht!</b>          Besondere Angaben bzw. Ge- und Verbote zur Vermeidung von leichten Verletzungen und Sachschäden an der Auffahrrampe werden mit dem links abgebildeten Symbol und dem fett dargestellten Wort <b>Vorsicht</b> gekennzeichnet.</p>
	<p><b>Achtung!</b>          Besondere Angaben bzw. Ge- und Verbote zur Vermeidung von Sachschäden an der Auffahrrampe werden mit dem links abgebildeten Symbol und dem fett dargestellten Wort <b>Achtung</b> gekennzeichnet.</p>
	<p><b>Hinweis</b>          Hinweise und Tipps zur Bedienung der Auffahrrampe werden mit dem links abgebildeten Symbol und dem fett dargestellten Wort <b>Hinweis</b> gekennzeichnet.</p>

## 2. Sicherheit

### Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die **SYSTEM STROBEL** – Auffahrrampe für Krankentransportfahrzeuge ist ausschließlich für die in Kapitel 3.1 beschriebene Verwendung vorgesehen.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung der Auffahrrampe gehören auch das Lesen dieses Benutzerhandbuchs und das Beachten der darin enthaltenen Angaben zu:

- Bedienung
- Wartung und Pflege

Verändern Sie die Auffahrrampe nicht, um sie anderen Verwendungen zu erschließen, ansonsten erlischt Ihr Garantieanspruch.

### 3. Übersicht

#### 3.1. Verwendung und Leistungsbeschreibung

Die **SYSTEM STROBEL** – Auffahrrampe wurde für den Einsatz in Krankentransportfahrzeugen entwickelt. Die Auffahrrampe dient zum bequemen Be- und Entladen eines Trage- oder Rollstuhls.

Mit der **SYSTEM STROBEL** – Auffahrrampe können unterschiedliche Trage- oder Rollstühle be- und entladen werden.

#### 3.2. Technische Daten

Maximale Tragfähigkeit: **200 kg**  
Eigengewicht Auffahrrampe: **41-44 kg**

### 4. Bedienelemente der Auffahrrampe

#### 4.1. Bezeichnungen


In diesem Benutzerhandbuch werden Richtungsangaben im Zusammenhang mit dem Krankentransportfahrzeug immer in Fahrtrichtung angegeben.

- Rechts bedeutet in Fahrtrichtung rechts.
- Links bedeutet in Fahrtrichtung links.

Ihre Position im Krankentransportfahrzeug bzw. Ihre Blickrichtung ist dabei nicht entscheidend.

#### 4.2. Gesamtübersicht


Eingeklappter Zustand:

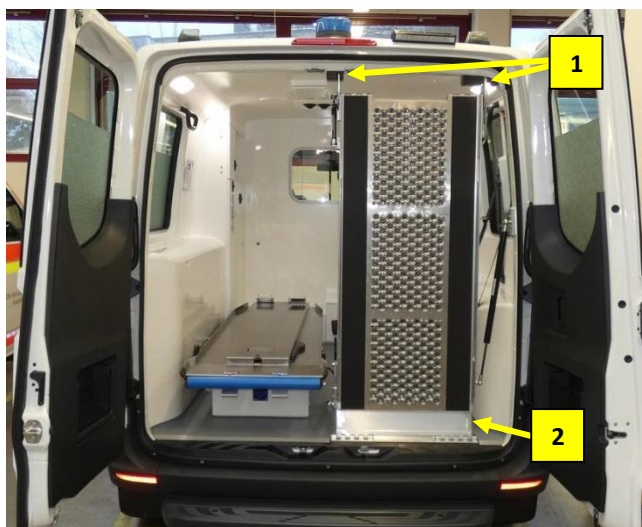

**1** – Anschläge zur Aufnahme und Arretierung der eingeklappten Auffahrrampe

**2** – Anfahrkeil als Bodenauflage der ausgeklappten Auffahrrampe

### Ausgeklappter Zustand:

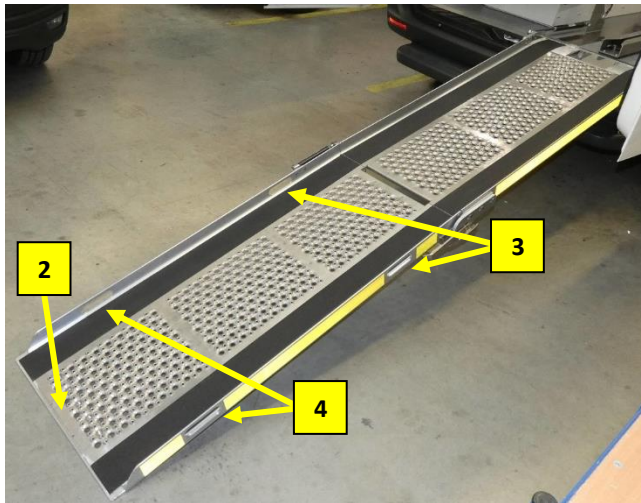


**2** – Anfahrkeil als Bodenauflage der ausgeklappten Auffahrrampe

**3** – Griffe oben zum Aus- und Einklappen (rechts und links)

**4** – Griffe unten zum Aus- und Einklappen (rechts und links)

### Arretierung:

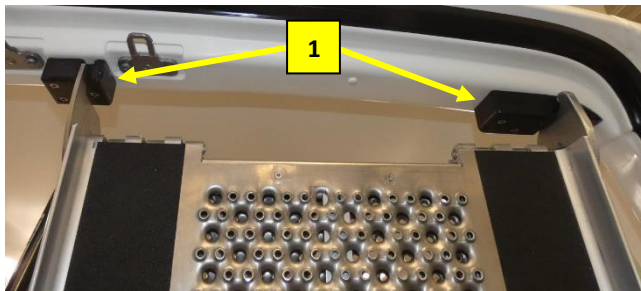

**1** – Anschläge zur Aufnahme und Arretierung der eingeklappten Auffahrrampe

## 5. Bedienung

	<p><b>Vorsicht!</b></p> <p>Das Aus- und Einklappen der Auffahrrampe und das Be- und Entladen des Patienten im Trage- oder Rollstuhl ist nur durch <b>zwei eingewiesene Personen</b> zulässig.</p>
--	---

### 5.1. Auffahrrampe ausklappen


	<p><b>Achtung!</b></p> <p>Sie benötigen zum Ausklappen der Auffahrrampe und dem Be- und Entladen eines Trage- oder Rollstuhls einen Rangierabstand von mindestens 4 m! Benutzen Sie die Auffahrrampe auf möglichst ebenem und festem Untergrund! Die Auffahrrampe muss im ausgeklappten Zustand rechts und links gleichmäßig aufliegen!</p>
--	---

So klappen Sie die Auffahrrampe aus:

1. Öffnen Sie die Hecktüren des Krankentransportfahrzeugs.
2. Greifen Sie die Auffahrrampe an den beiden unteren Griffen.
3. Entriegeln Sie die Auffahrrampe, indem Sie gleichzeitig an den beiden unteren Griffen der Auffahrrampe ziehen.
4. Klappen Sie die Auffahrrampe an den unteren Griffen heraus und legen Sie diese mit den Anfahrkeilen flach auf den Boden auf.

Die Auffahrrampe ist ausgeklappt.

5.2. Trage- oder Rollstuhl be- und entladen


	<p><b>Hinweis</b></p> <p>Vor Benutzung des Trage- oder Rollstuhls lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung/das Benutzerhandbuch des entsprechenden Gerätes und machen sich mit dem Umgang vertraut.</p> <p>Der Trage- oder Rollstuhl wird über die Auffahrrampe geführt bzw. geschoben und je nach Typ mit der entsprechenden Bodenhalterung fixiert.</p>
---	---

5.3. Auffahrrampe einklappen

So klappen Sie die Auffahrrampe ein:

1. Greifen Sie die Auffahrrampe an den beiden unteren Griffen und heben Sie die Auffahrrampe an.
2. Greifen Sie die Auffahrrampe an den beiden oberen Griffen und klappen Sie die Auffahrrampe zusammen.
3. Führen Sie die Auffahrrampe in die eingeklappte Position. Die Auffahrrampe wird automatisch durch die Zylinder und einen Magneten in Richtung Krankentransportfahrzeug gezogen und an den Anschlängen arretiert.

Die Auffahrrampe ist eingeklappt.

	<p><b>Vorsicht!</b></p> <p>Überprüfen Sie unbedingt, nachdem Sie die Auffahrrampe eingeklappt haben, ob der Bolzen hinter dem jeweiligen Anschlag korrekt arretiert ist.</p>
---	--

## 6. Pflege und Wartung

Desinfizieren Sie alle Flächen der Auffahrrampe regelmäßig mit einem alkoholfreien Desinfektionsmittel und neutralen Reinigungsmitteln.

Die **SYSTEM STROBEL** – Auffahrrampe für Krankentransportfahrzeuge ist 14-tägig an allen Gelenkpunkten mit einem säurefreien Öl zu schmieren.



### **Vorsicht!**

Reparaturen an der Auffahrrampe dürfen nur von dafür ausgebildeten Personen durchgeführt werden. Nicht dafür ausgebildete Personen können sich verletzen oder Schäden an der Auffahrrampe verursachen.

## 7. Service

Sie können unseren Service werktags von  
**7:30 – 12:00 Uhr** und **13:00 – 16:30 Uhr**  
unter der Telefonnummer **07361 / 9787 – 0** erreichen.