
SYSTEM STROBEL – Auffahrschienen

QUALITÄT DIE LEBEN RETTET

Benutzerhandbuch




Für die künftige Verwendung aufbewahren!

Inhalt

1.	Allgemeines	3
2.	Sicherheit.....	3
3.	Übersicht	4
3.1.	Verwendung und Leistungsbeschreibung	4
3.2.	Technische Daten	4
4.	Bedienelemente der Auffahrschienen	4
4.1.	Bezeichnungen	4
4.2.	Gesamtübersicht	4
4.2.1.	Teleskopauffahrschienen	5
4.2.2.	Feste Auffahrschienen.....	6
4.2.3.	Verschiebbare Auffahrschienen	7
5.	Bedienung.....	8
5.1.	Auffahrschienen ausklappen	8
5.1.1.	Teleskopauffahrschienen ausklappen	8
5.1.2.	Feste Auffahrschienen ausklappen	8
5.1.3.	Verschiebbare Auffahrschienen ausklappen.....	9
5.2.	Tragestuhl be- und entladen	9
5.3.	Auffahrschienen einklappen	9
5.3.1.	Teleskopauffahrschienen einklappen	9
5.3.2.	Feste Auffahrschienen einklappen	10
5.3.3.	Verschiebbare Auffahrschienen einklappen	10
6.	Pflege und Wartung.....	10
7.	Service	10

1. Allgemeines

In diesem Benutzerhandbuch werden folgende Symbole und Signalwörter verwendet:

	<p>Vorsicht! Besondere Angaben bzw. Ge- und Verbote zur Vermeidung von leichten Verletzungen und Sachschäden an den Auffahrschienen werden mit dem links abgebildeten Symbol und dem fett dargestellten Wort Vorsicht gekennzeichnet.</p>
	<p>Achtung! Besondere Angaben bzw. Ge- und Verbote zur Vermeidung von Sachschäden an den Auffahrschienen werden mit dem links abgebildeten Symbol und dem fett dargestellten Wort Achtung gekennzeichnet.</p>
	<p>Hinweis Hinweise und Tipps zur Bedienung der Auffahrschienen werden mit dem links abgebildeten Symbol und dem fett dargestellten Wort Hinweis gekennzeichnet.</p>

2. Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die **SYSTEM STROBEL** – Auffahrschienen für Krankentransportfahrzeuge sind ausschließlich für die in Kapitel 3.1 beschriebene Verwendung vorgesehen.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung der Auffahrschienen gehören auch das Lesen dieses Benutzerhandbuchs und das Beachten der darin enthaltenen Angaben zu:

- Bedienung
- Wartung und Pflege

Verändern Sie die Auffahrschienen nicht, um sie anderen Verwendungen zu erschließen, ansonsten erlischt Ihr Garantieanspruch.

3. Übersicht

3.1. Verwendung und Leistungsbeschreibung

Die **SYSTEM STROBEL** – Auffahrschienen wurden für den Einsatz in Krankentransportfahrzeugen entwickelt. Die Auffahrschienen dienen zum bequemen Be- und Entladen eines Tragestuhls.

Mit den **SYSTEM STROBEL** – Auffahrschienen können unterschiedliche Tragestühle be- und entladen werden.

3.2. Technische Daten

Maximale Tragfähigkeit:	200 kg
Eigengewicht Auffahrschienen im Set:	22-36 kg
Eigengewicht Teleskopauffahrschienen im Set:	18 kg

4. Bedienelemente der Auffahrschienen

4.1. Bezeichnungen

In diesem Benutzerhandbuch werden Richtungsangaben im Zusammenhang mit dem Krankentransportfahrzeug immer in Fahrtrichtung angegeben.

- Rechts bedeutet in Fahrtrichtung rechts.
- Links bedeutet in Fahrtrichtung links.

Ihre Position im Krankentransportfahrzeug bzw. Ihre Blickrichtung ist dabei nicht entscheidend.

4.2. Gesamtübersicht

Im Folgenden werden die möglichen Varianten der Auffahrschienen dargestellt und erklärt.

Teleskopauffahrschienen



feste Auffahrschienen




verschiebbare Auffahrschienen



4.2.1. Teleskopauffahrschienen

Demontierter Zustand:

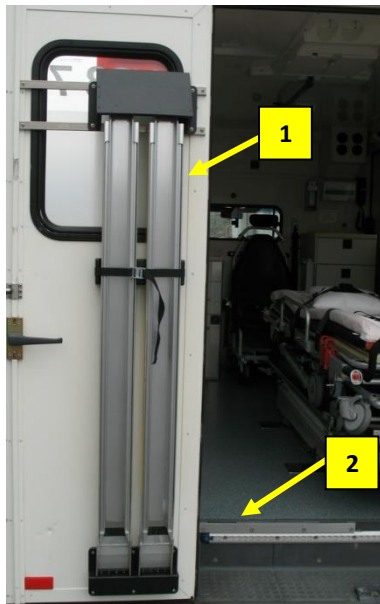




1 – Teleskopauffahrschienen im demontierten Zustand
(Hier beispielhaft montiert an der Hecktüre. Auch andere Positionen im Fahrzeug zur Aufbewahrung sind möglich)

2 – Leiste zum Einhängen der Teleskopauffahrschienen

3 – Halterung für Teleskopauffahrschienen oben

4 – Halterung für Teleskopauffahrschienen unten

5 – Winkel zum Einhängen der Teleskopauffahrschiene an der Leiste am Fahrzeug

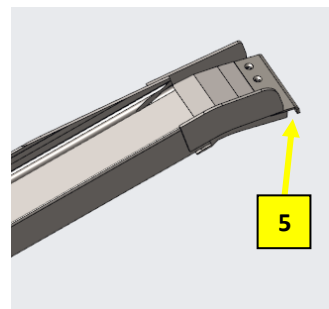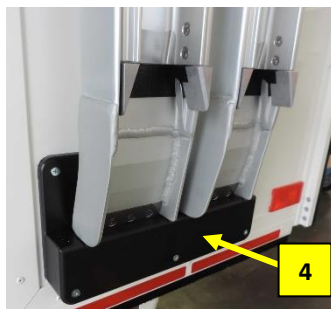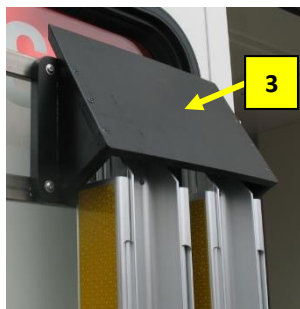



Montierter Zustand:



6 – Anfahrkeile als Bodenauflage der ausgeklappten Teleskopauffahrschienen

7 – Teleskopauffahrschienen an der Leiste eingehängt


Arretierung:

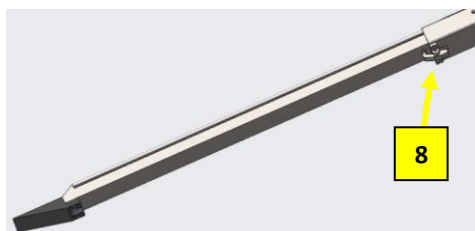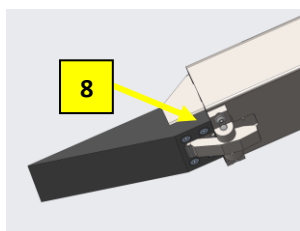

8 – Positionen zur Arretierung der Teleskopauffahrschiene

4.2.2. Feste Auffahrschienen


Eingeklappter Zustand:

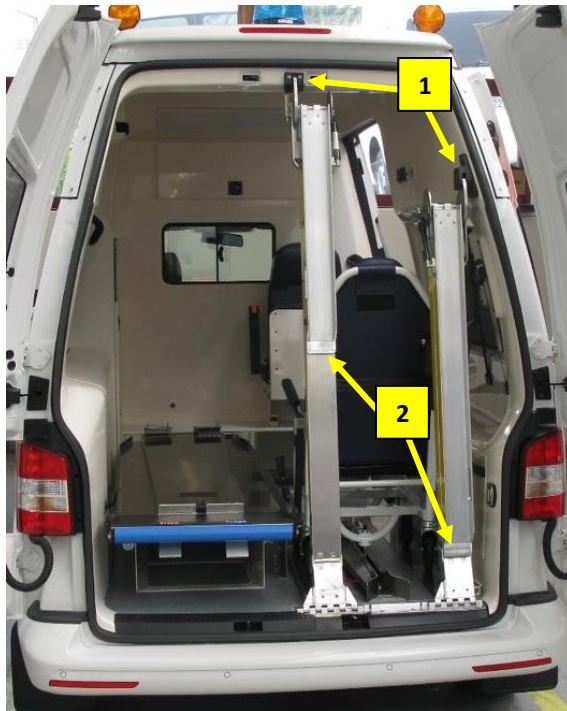

1 – Anschläge zur Aufnahme und Arretierung der eingeklappten Auffahrschienen

2 – Anfahrkeile als Bodenauflage der ausgeklappten Auffahrschienen


Ausgeklappter Zustand:

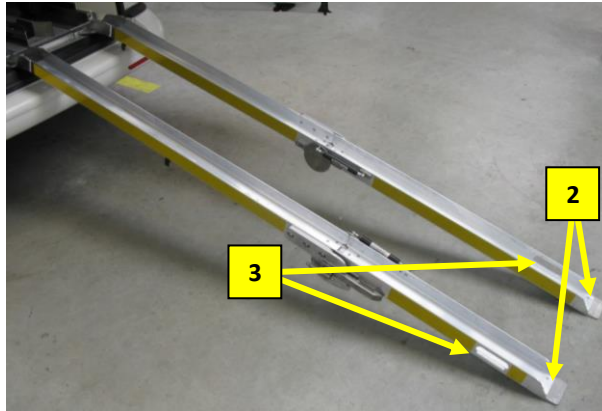

2 – Anfahrkeile als Bodenauflage der ausgeklappten Auffahrschienen

3 – Griffe zum Aus- und Einklappen der Auffahrschienen


Arretierung:

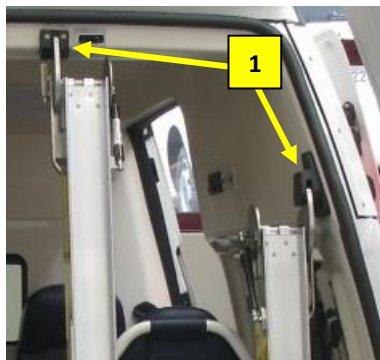


1 – Anschläge zur Aufnahme und Arretierung der eingeklappten Auffahrschienen

4.2.3. Verschiebbare Auffahrschienen


Eingeklappter Zustand:

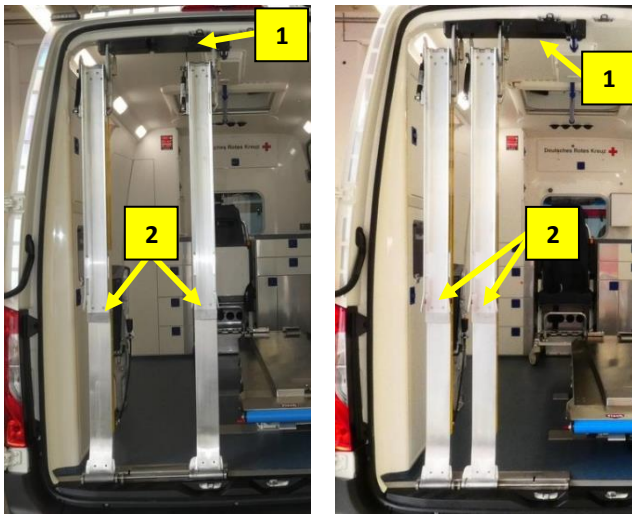

- 1** – Anschlag zur Aufnahme und Arretierung der eingeklappten Auffahrschienen
- 2** – Anfahrkeile als Bodenauflage der ausgeklappten Auffahrschienen
- 3** – Leiste am Fahrzeug zur Positionierung und Arretierung der Auffahrschienen

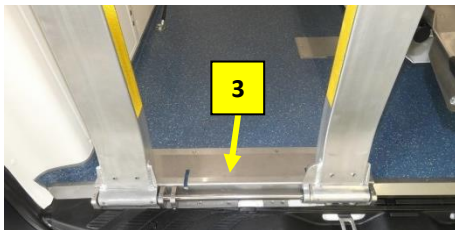

Ausgeklappter Zustand:

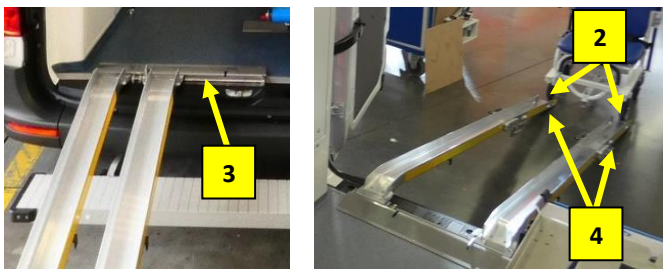


- 2** – Anfahrkeile als Bodenauflage der ausgeklappten Auffahrschienen
- 3** – Leiste am Fahrzeug zur Positionierung und Arretierung der Auffahrschienen
- 4** – Griffe zum Aus- und Einklappen der Auffahrschienen

Arretierung:



- 1** – Anschlag zur Aufnahme und Arretierung der eingeklappten Auffahrschienen
- 3** – Leiste am Fahrzeug zur Positionierung und Arretierung der Auffahrschienen

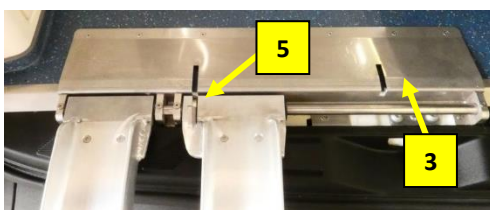

- 5** – Wippe zum Arretieren der beweglichen Auffahrschiene im ein- und ausgeklappten Zustand

5. Bedienung



Vorsicht!

Das Aus- und Einklappen der Auffahrschienen und das Be- und Entladen des Patienten im Tragestuhl ist nur durch **zwei eingewiesene Personen** zulässig.

5.1. Auffahrschienen ausklappen



Achtung!

Sie benötigen zum Ausklappen der Auffahrschienen und dem Be- und Entladen eines Tragestuhls einen Rangierabstand von mindestens 4 m! Benutzen Sie die Auffahrschienen auf möglichst ebenem und festem Untergrund! Die Auffahrschienen müssen im ausgeklappten Zustand gleichmäßig aufliegen!

So klappen Sie die Auffahrschienen aus:

5.1.1. Teleskopauffahrschienen ausklappen

1. Öffnen Sie die Hecktüren des Krankentransportfahrzeugs.
2. Entnehmen Sie die Auffahrschienen einzeln aus der Halterung und hängen Sie diese in die dafür vorgesehenen Aussparungen in der Leiste am Fahrzeug ein.
3. Lösen Sie die Arretierung an der Unterseite der jeweiligen Auffahrschiene und ziehen Sie den Teleskopauszug aus, bis diese erneut arretiert.
4. Legen Sie die Auffahrschienen mit den Anfahrkeilen flach auf den Boden auf.


5.1.2. Feste Auffahrschienen ausklappen

1. Öffnen Sie die Hecktüren des Krankentransportfahrzeugs.
2. Greifen Sie die jeweilige Auffahrschiene am Griff.
3. Durch Ziehen am Griff entriegeln Sie die Auffahrschienen.
4. Klappen Sie die Auffahrschienen heraus und legen Sie diese mit den Anfahrkeilen flach auf den Boden auf.


5.1.3. Verschiebbare Auffahrschienen ausklappen

1. Öffnen Sie die Hecktüren des Krankentransportfahrzeugs.
2. Greifen Sie die jeweilige Auffahrschiene am Griff.
3. Durch Ziehen am Griff entriegeln Sie die Auffahrschienen.
4. Klappen Sie die Auffahrschienen heraus und legen Sie diese mit den Anfahrkeilen flach auf den Boden auf.
5. Verschieben Sie die Position der Auffahrschienen nur im ausgeklappten Zustand. Wenn Sie die Wippe zur Arretierung lösen, können Sie die Auffahrschiene verschieben und an der anderen Position arretieren.

5.2. Tragestuhl be- und entladen

	<p>Hinweis</p> <p>Vor Benutzung des Tragestuhls lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung/das Benutzerhandbuch des entsprechenden Gerätes und machen sich mit dem Umgang vertraut.</p> <p>Der Tragestuhl wird über die Auffahrschienen geführt bzw. geschoben und je nach Typ mit der entsprechenden Bodenhalterung fixiert.</p>
---	--

5.3. Auffahrschienen einklappen

	<p>Vorsicht!</p> <p>Überprüfen Sie unbedingt, nachdem Sie die feste oder verschiebbare Auffahrschiene eingeklappt haben, ob der Bolzen hinter dem jeweiligen Anschlag korrekt arretiert ist.</p>
---	---

So klappen Sie die Auffahrschienen ein:

5.3.1. Teleskopauffahrschienen einklappen

1. Greifen Sie die jeweilige Auffahrschiene an der Unterseite und heben Sie diese an.
2. Lösen Sie die Arretierung an der Unterseite der jeweiligen Auffahrschiene und schieben Sie den Teleskopauszug zusammen bis diese erneut arretiert.
3. Hängen Sie die Auffahrschienen einzeln aus der Leiste am Fahrzeug aus und stellen Sie diese in die vorgesehene Halterung.

5.3.2. Feste Auffahrschienen einklappen

1. Greifen Sie die jeweilige Auffahrschiene am unteren Griff und heben Sie die Auffahrschiene an.
2. Klappen Sie die Auffahrschiene zusammen.
3. Die Auffahrschienen werden automatisch durch die Zylinder und einen Magneten in Richtung Krankentransportfahrzeug gezogen und an den Anschlägen arretiert.

5.3.3. Verschiebbare Auffahrschienen einklappen

1. Greifen Sie die jeweilige Auffahrschiene am unteren Griff und heben Sie die Auffahrschiene an.
2. Klappen Sie die Auffahrschiene zusammen.
3. Die Auffahrschienen werden automatisch durch die Zylinder und einen Magneten in Richtung Krankentransportfahrzeug gezogen und an den Anschlägen arretiert.

6. Pflege und Wartung

Desinfizieren Sie alle Flächen der Auffahrschienen regelmäßig mit einem alkoholfreien Desinfektionsmittel und neutralen Reinigungsmitteln.

Die **SYSTEM STROBEL** – Auffahrschienen für Krankentransportfahrzeuge sind 14-tägig an allen Gelenkpunkten mit einem säurefreien Öl zu schmieren.



Vorsicht!

Reparaturen an den Auffahrschienen dürfen nur von dafür ausgebildeten Personen durchgeführt werden. Nicht dafür ausgebildete Personen können sich verletzen oder Schäden an den Auffahrschienen verursachen.

7. Service

Sie können unseren Service werktags von
7:30 – 12:00 Uhr und **13:00 – 16:30 Uhr**
unter der Telefonnummer **07361 / 9787 – 0** erreichen.